



Fortuna

Mechanický skládací vozík

Předprodejní informace a návod



1. Identifikace výrobku

Parametr	Hodnota
Název a typ	Mechanický vozík Fortuna
Výrobce	Tina Mělník, s.r.o.
Adresa	Zelená 3749, 276 01 Mělník
CE značení	CE dle MDR 2017/745
Maximální hmotnost uživatele	300 kg

2. Účel použití

Mechanický vozík Fortuna je určen pro:

- dospělé uživatele s omezenou schopností chůze,
- kteří potřebují podporu při přesunu na krátké a střední vzdálenosti,
- pro použití na pevných, rovných a suchých površích (interiér, chodníky, dvory).

Není určen:

- pro použití na schodech, strmých svazích nebo nerovném terénu,
- jako sedadlo pro přepravu osob v motorových vozidlech.



3. Základní technické údaje

Uvedené údaje se vztahují k základní verzi vozíku se **šířkou sedu 60 cm** a **hloubkou sedu 45 cm**.

Parametr	Hodnota
Šířka otáčení (min. prostor)	150 cm
Maximální sklon pro použití parkovací brzdy	7°
Jmenovitý sklon (pro bezpečnou jízdu)	6°
Maximální hmotnost uživatele	300 kg
Celková šířka vozíku	83 cm
Celková výška vozíku	93 cm
Celková hloubka vozíku	118 cm
Hmotnost vozíku*	37,5 kg

* Uvedená hmotnost se vztahuje na základní model bez odnímatelného příslušenství.

4 Obsah dodávky

- mechanický vozík Fortuna v kompletně smontovaném stavu (pokud není uvedeno jinak),
- dvojici opěrných koleček,
- opěrku nohou (levou a pravou),
- nožní plech,
- návod k použití v českém jazyce,
- prohlášení o shodě (CE)

5. Omezení použití a výstrahy

- Vozík nesmí být používán jako sedadlo při přepravě v motorovém vozidle.
- Uživatel musí být při přepravě přesazen na vhodné automobilové sedadlo vybavené bezpečnostními pásy.
- Vozík nesmí být přetěžován nad maximální hmotnost uživatele 300 kg.
- Při jízdě na svazích se nedoporučuje překračovat jmenovitý sklon 6°.
- Parkovací brzda je určena pro použití maximálně na svazích do 7°.

6. Odkaz na návod k obsluze

Tento dokument slouží k poskytnutí klíčových informací pro rozhodnutí o koupi. Podrobné pokyny pro nastavení, údržbu a bezpečný provoz jsou uvedeny v návodu k obsluze, který obdržíte společně s výrobkem.





Tina Mělník

výroba a prodej rehabilitačních pomůcek

Díky více než třicetiletým zkušenostem s výrobou invalidních vozíků a jejich specifických úprav - zejména invalidních vozíků pro vysokou zátěž, jsme mohli nabídnout naprosto spolehlivé produkty ověřené tisíci uživateli po celé Evropě. Předností našich výrobků je spolehlivost a funkčnost.

Neustálé investice do společnosti, zejména do strojů a nástrojů, nám umožňují řešit i velmi specifické požadavky zákazníků a přinášet na trh unikátní produktová řešení. Společně s neustálým vývojem a sledováním trendů v oboru REHA jsme schopni poskytovat špičkové produkty a služby. Naše společnost je certifikována podle norem ISO.



Mezi hlavní produkty patří mechanické vozíky známe pod značkou Fortuna a Tina (osazené originálními hliníkovými koly vlastní výroby) s nosností až 300 kg. Dalším důležitým produktem je toaletní křeslo a židle, které nabízí originální design a funkčnost. V sortimentu našich zdravotnických prostředků jsou chodítka pro usnadnění chůze, specializovaná na vysokou zátěž.

Díky speciálním úpravám si naše výrobky získaly mezi zákazníky a distributory vysokou reputaci.



Tina Mělník s.r.o.

Zelená 3749, 276 01 Mělník

E-mail: info@tina-melnik.cz

www.tina-melnik.cz